

Från 23/10 2023 har Svedin Rehab en ny leverantör av handkuddarna

(Firman Posey har slutat att tillverka sina handkuddar)

Därmed kan åter den större handkudden med fingerskiljare 406562 säljas.

Dessa nya handkuddar är CE-godkända enl. MDR klass 1, så priset behöver höjas

Handkudden finns i 2 olika modeller, med eller utan fingerskiljare.

Art.nr. 406508 Handkudde utan fingerskiljare, en storlek. 13 x 7 cm.

Pris från 2023-10-23 är 198 kr + moms och frakt.

Art.nr. 406562 Handkudde med fingerskiljare, vuxenstorlek, 15 x 9 cm.

Pris från 2023-10-23 är 220 kr + moms och frakt.



Art.nr. 406508



Art.nr. 406562

*Det finns ett restlager kvar av **Art.nr 406560 Posey Handkudde med fingerskiljare** för små händer, som säljs för 120 kr + moms och frakt.*

Handkuddarna är fyllda med mjuk polyester och är överdragna med bomullsfrotté som absorberar fukt och handsvett. Den hålls kvar i brukarens hand med ett mjukt töjbart resårband som ligger runt handens ovansida. Handkuddarna är helt latexfria.

Bakgrund

Vid långvariga sjukdomstillstånd, som medför att en patient inte rör sig, finns en risk att kontrakturer uppkommer dvs. att lederna stelnar i ett böjt läge. Händerna kan då bli hårt knutna och det blir svettigt och varmt i handflatan och mellan fingrarna, vilket kan orsaka svampinfektioner mm. Fingrarna och naglarna kan dessutom trycka hårt in i handflatan.

Användning: Dessa mjuka handkuddar är ett hjälpmedel i patientens dagliga behandling för att motverka kontrakturer i händerna genom att den förhindrar att handen knyter sig. Den finns dels med fingerdelare (406562, 406560) som motverkar att fingrarna pressas ihop, men även utan fingerdelare (406508). Innan handkudden sätts på plats skall, om det är möjligt, kontraktur-profylax utföras i hand och arm. Det är viktigt att patienten får hjälp med detta för att behålla den rörlighet som finns kvar och underlätta blodcirkulationen samt förhindra att lederna stelnar mer. Rörelserna måste alltid vara mycket mjuka och försiktiga och ska alltid ske så ingen smärta uppkommer. Det är bra om armen, i viloläge, har rak handled och att armbågen inte är för mycket böjd så att blodcirkulationen i armen blir blockerad. Vid behov bör en arbetsterapeut/sjukgymnast tillfrågas så att kontraktur-profylaxen utförs på rätt sätt och de kan då även bedöma om en mer avancerad stödskena/ handortos behöver användas.

OBS: Handkudden bör efter ca 2 timmars användning tas av så man kan kolla huden, fukten och cirkulationen i handen och en lätt kontraktur profylax bör då utföras. Det är därför en fördel om det finns 2 handkuddar som man kan alternera mellan när den ena blir svettigt eller behöver tvättas.

Handkuddarna tvättas i skontvätt 40 grader.

Använd gärna tvättpåse, låt den droptorka.



Elisabeth Svedin/ Leg arbetsterapeut

Beställ via e-butiken på www.svedinrehab.se eller med e-post elisabeth@svedinrehab.se
Uppge leveransadress/kontaktperson/mobilnummer och faktura adressen inkl. referens.
eller ring/sänd ett sms till 0709 695269